

ERGOMAR®

Spray Nasal

Higiene nasal diária

MICRODIFUSÃO FISIOLÓGICA DE ÁGUA DO MAR ISOTÓNICA
NATURALMENTE RICA EM MINERAIS E OLIGOELEMENTOS

7088
03/07

Utilização: O Spray nasal ERGOMAR® está indicado na lavagem nasal diária e obstrução nasal do recém-nascido, criança e adulto.

Propriedades: O Spray nasal ERGOMAR® é uma solução isotónica de água do mar purificada e microbiologicamente filtrada. Esta solução não contém conservantes, sendo rica em oligoelementos, sais minerais, com uma concentração fisiológica em sal.

Modo de emprego: Para uma higiene nasal diária: 1 a 2 pulverizações em cada narina 2 vezes/dia. Em caso de obstrução nasal e remoção de mucosidades: 1 a 2 pulverizações 4 vezes/dia.

Composição:

Água do mar: 31,82 ml – Água purificada q.b.p. 100 ml

Gás propulsor: Azoto. Não se encontra em contacto com a solução.

Recipiente sob pressão de gás inerte (azoto). Proteger dos raios solares. Não expor a temperaturas superiores a 50° C.
Não perfurar ou queimar mesmo depois de utilizado.

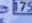
Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilizar este produto para nenhum outro fim senão aquele a que especificamente se destina.

LOT



N.º de lote e prazo de validade:
Ver fundo do frasco

Volume líquido: 100 ml  175
Cerca de 300 pulverizações



Fabricante:

SIDEFARMA
Sociedade Industrial de Expansão Farmacéutica, S.A.
Rua da Quilã, nº28 - 2569-014 Póvoa Velha

CE 0459